

---

*EXAME: PGARD – PESQUISA PARA GARDNERELLA*  
*CBHPM – 40601137*

---

**Material:** Secreções de mucosas do trato genito-urinário.

**Meio de Coleta:** Porta Lâminas (Fornecido pelo Laboratório Memphys)

**Método:** Coloração de Papanicolaou

**Prazo:** 5 dias úteis

**Realização:** Segunda a sexta-feira

### **Comentários**

A *Gardnerella vaginalis* é uma bactéria que habita a região íntima feminina, mas que normalmente se encontra em concentrações muito baixas, não produzindo qualquer tipo de problema ou sintoma. No entanto, quando as concentrações de *Gardnerella* aumentam, devido a fatores de risco como uso de cigarro, lavagem vaginal frequente ou múltiplos parceiros sexuais, pode surgir uma infecção vaginal, conhecida como vaginose bacteriana ou vaginite de Gardnerella. Esta infecção causa sintomas como cheiro fétido e corrimento amarelado, mas pode ser tratada facilmente com antibióticos receitados pelo médico, sendo, por isso, recomendado consultar o ginecologista sempre que surjam alterações na região íntima.

### **Instruções de preparo**

A coleta deve sempre ser realizada pelo médico ou enfermeira treinada, nos sítios anatômicos segundo indicação clínica.

Limpe o local com um swab de algodão estéril antes da amostragem. Introduza o swab no local e gire. Retire o swab sem tocar em outras áreas. Role o swab para trás e para frente na lâmina de vidro para cobrir a área do poço. Deixe a amostra secar ao ar livre e então fixe em Metanol por 5 minutos. Identificar a lâmina com etiqueta, cadastrar os dados no site do Laboratório Memphys e enviar dados clínicos/pedido médico juntamente com o material.

**Transportar em temperatura ambiente.**