
*EXAME: PUNCA – PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (POR TOPOGRAFIA)
CBHPM – 40601250*

Material: Líquidos corpóreos de topografias diversas

Meio de Coleta: Frasco estéril com álcool a 50% em proporção igual ao volume da amostra ou refrigerado por no máximo 24 horas.

Método: Microscopia Óptica

Prazo: 7 dias úteis

Realização: Segunda a sexta-feira

Citopatologia de punção-biópsia de líquidos de órgãos variados

Comentários

O exame visa diagnosticar patologias benignas bem como lesões pré-malignas ou malignas. A interpretação dos esfregaços baseia-se em aspectos morfológicos previamente conhecidos. Alguns aspectos morfológicos de graduação das lesões dependem, até certo ponto, de interpretação subjetiva.

Condição

Punção de Mama.

Líquidos ascítico, sinovial, pleural, pericárdico.

Punções de coleções superficiais.

Punções de tireóide, cistos de ovário

Conservação para envio

- Lâmina (esfregaço pronto): fixar imediatamente em álcool acima de 96º e deixar por, no mínimo, 30 minutos.

- Líquido: álcool a 50% em proporção igual ao volume da amostra ou refrigerado por, no máximo, 24 horas.

Identificar a lâmina e/ou frasco com etiqueta, cadastrar os dados no site do Laboratório Memphys e enviar o material juntamente com os dados clínicos/pedido médico.

Nota: Se no momento do preparo da amostra forem evidenciados sedimentos do tecido junto ao líquido, o mesmo será incluído em parafina (*cell block*) sendo adicionado um exame de Anátomo Patológico ao cadastro do paciente.

Transportar em temperatura ambiente.